

Urinalysis コード集

2024 年 4 月 17 日

Urinalysis のカテゴリ：「7」

A. 測定項目コード表一覧

UF-コントロール

項目名	項目コード	分類 ※1	方法 ※1	機器 ※2	校正 ※1	温度 ※1	試薬ロット ※1	単位	単位名
RBC	1A301	0	01	※2	79	08	999	59	/uL
WBC	1A302	0	01	※2	79	08	999	59	/uL
EC	1A303	0	01	※2	79	08	999	59	/uL
CAST	1A304	0	01	※2	79	08	999	59	/uL
BACT	1A305	0	01	※2	79	08	999	59	/uL
Cond	1A306	0	01	※2	79	08	999	72	mS/cm
SF_FSC_P ※3	1A601	0	01	※2	79	08	999	70	ch
SF_FSC_W ※3	1A602	0	01	※2	79	08	999	70	ch
SF_FLH_P ※3	1A603	0	01	※2	79	08	999	70	ch
SF_SSL_P ※3	1A604	0	01	※2	79	08	999	70	ch
SF_DSS_P ※3	1A605	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CW_FSC_P ※3	1A606	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CW_FLH_P ※3	1A607	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CW_SSH_P ※3	1A608	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CW_SSL_P ※3	1A609	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CW_DSS_P ※3	1A610	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CB_FSC_P ※3	1A611	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CB_FLL_P ※3	1A612	0	01	※2	79	08	999	70	ch
CB_SSH_P ※3	1A613	0	01	※2	79	08	999	70	ch

※1:分類、方法、校正、温度、試薬ロットは、全項目共通です。

※2:機器のコードは、使用されている機器のコードを入力して下さい(LAB507、或いは、LAB508)。

機器コード	機器名
LAB507	UF-3000/4000/5000
LAB508	UF-1500

※3:この項目は、UF-コントロール-H のみ設定して下さい。

UF II コントロール

項目名	項目コード	分類※1	方法※1	機器※1	校正※1	温度※1	試薬ロット※1	単位	単位名
RBC	1A301	0	01	LAB502	79	08	999	59	/uL
WBC	1A302	0	01	LAB502	79	08	999	59	/uL
EC	1A303	0	01	LAB502	79	08	999	59	/uL
CAST	1A304	0	01	LAB502	79	08	999	59	/uL
BACT	1A305	0	01	LAB502	79	08	999	59	/uL
Cond	1A306	0	01	LAB502	79	08	999	72	mS/cm
S_FSC	1A401	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
S_FSCW	1A402	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
S_FLH	1A403	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
S_FLL	1A404	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
S_FLLW	1A405	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
S_SSC	1A406	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
B_FSC	1A501	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
B_FSCW	1A502	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch
B_FLH	1A503	0	01	LAB502	79	08	999	70	ch

※1:分類、方法、機器、校正、温度、試薬ロットは、全項目共通です。

UF II コントロールの対象機器は以下の通りです。

機器コード	機器名
LAB502	UF-1000i/500i

B. コントロールロットの表記

コントロール試料	箱ロット(例)	ロット番号の表記(例)	L H	XQC データ確認/QC-Registe ロット番号の表記(例)	L H
UF-コントロール	UK0215	1QC-UK0215L_M 2QC-UK0215H_M		#0215(Low)_OP #0215(HIGH)_OP	
UF II コントロール	YS3005	1QC-YS3005L_M 3QC-YS3005H_M		#3005(Low)_OP #3005(HIGH)_OP	

注) 検査システムから eqc ファイルを作成してデータ送信する場合のロット番号には、必ず、箱ロット番号の前後に以下の文字(青字斜体にした文字)を付加して下さい。

UF-コントロール-L : *1QC-箱ロット L_M*

UF-コントロール-H : *2QC-箱ロット H_M*

UF II コントロール-L : *1QC-箱ロット L_M*

UF II コントロール-H : *3QC-箱ロット H_M*

以上