

2020年4月

お客様 各位

シスメックス株式会社

新型コロナウイルスに関する除染手順に関するお知らせ

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス(COVID-19)に関しまして、弊社の分析機器の表面にウイルスが付着した場合の除染手順を下記のとおりご連絡申し上げます。

弊社としましても、この度の新型コロナウイルスの早期封じ込めを願うべく、出来る限りのサポートをさせていただきます所存でございます。

謹白

記

1. 除染手順

- (1) 防護手袋、防護マスク、防護メガネ、防護服など、防護に適したものを着用する。
- (2) 乾いた血など目に見える跡が拭き取られるまで、一般的な中性洗剤で表面を拭き、清掃する。
- (3) 以下のいずれかの消毒液を10分間塗布した状態で表面を拭き取る。
 - エチルまたはイソプロピルアルコール(70%)
 - 次亜塩素酸ナトリウム(0.05~0.5%)
- (4) 表面に残った消毒液を取り除くために蒸留水で表面を洗浄する。

参考文献

- ISO 15190:Medical Laboratories –Requirements for safety
- CLSI M29 : Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infection
- WHO Decontamination and Reprocessing of Medical Device for Health-Care Facilities
- CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities

2. お問い合わせ先

本件についてご質問や不明点等がございましたら、最寄りの弊社支店・営業所またはカスタマーサポートセンターへお問合せ下さい。

以上