

**Q10. SNCS/eQAPi の「メニュー」には SNCS/eQAPi をご利用いただけます、と書いてありますが、具体的には何ができるのですか？**

A10. ログイン後「メニュー」をクリックすると、QC メニューが表示されます。Web 作表閲覧、データ登録、エラー履歴および装置情報の確認ができます。

メニュー QCメニュー 装置メニュー | 設定情報 < トップページへ戻る

Instrument List (QC)

Menu			
My Laboratory	Category: ALL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sysmex Corporation	XS-1000i	Kobe 72518	
Sysmex Corporation	XS-1000i	Ono 74125	

Web 作表メニュー

データ登録

エラー履歴

装置情報

※Web 作表メニューでできること

【QC チャート/数値テーブル】




日内・日次・月次の時系列データが  
図表で確認できます

【レポートダウンロード】




月次/日次帳票 (PDF レポート) がダウンロードできます  
※日次帳票は SNCS のお客様のみご利用いただけます

【QAP-MATRIX】

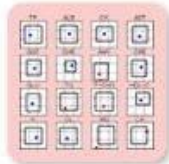


一度に多項目の 2 濃度プロットが  
閲覧できます

【SDI/PI ツインプロット】

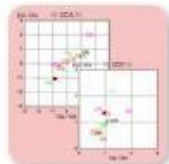

正確さと精密さの評価が  
閲覧できます

【散布図】

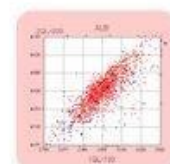

全体の散布図の中に自装置データを  
プロットします