


## Caresphere™ XQC 月次レポートのダウンロード方法

1. サポートインフォメーションサイトにログインし、「製品/ソリューションサービス」> Caresphere™ XQC」を選択してください。




2. Caresphere™ XQC のメニュー画面から「レポート」> 精度管理レポート」を選択してください。

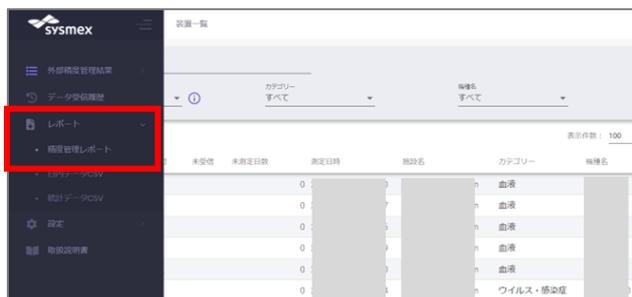

3. ダウンロードしたい月次レポートの対象月を選択し、「月次レポート」を選択してください。対象装置のチェックボックスにチェックを入れ、画面右下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。（日内データ登録装置において、日内データの QC エラー一覧が不要の場合は、チェックを外してダウンロードボタンをクリックしてください。）

※ダウンロードファイルは Zip 化されていますので、解凍してご確認ください。

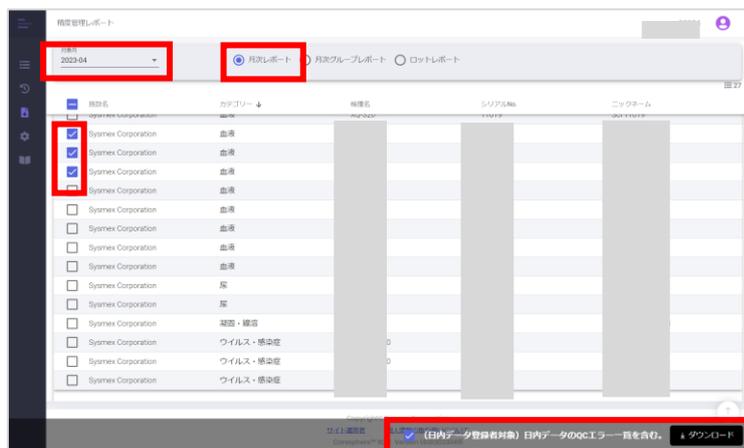

以上