

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

10 月分の月次集計が完了しましたので「今月のご連絡」を以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2018 年 11 月 29 日 (木曜日)

CD-ROM : 2018 年 11 月 26 日 (月曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受けに関するご案内

(1) 11 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 12 月 5 日 (水曜日) 必着

インターネットの場合 : 12 月 13 日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締切日/ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) 月次帳票及び CD-ROM 発送予定日掲載のお知らせ

毎月の発送予定日は、サポートインフォメーションサイトの「月次集計締切日/ロット集計期間」をご確認ください。

(2) CD-ROM 発送予定日について

2018 年 10 月号 CD-ROM の発送は、2018 年 11 月 26 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(3) イムノマルチコントロール HCG 項目集計開始のお知らせ

主題の通り、イムノマルチコントロールの HCG(項目コード:4F080)の SNCS 集計が開始されました。

(4) 内部精度管理 QC レポートのデータ登録ツールリリースのご案内

SNCS/eQAPi 集計対象以外の項目/コントロールの精度管理データ(日内データ)も、内部精度管理レポート(Xbar-Rs-R 管理図)を作成できるようにデータ登録ツール「QC-Register」及び「QC-Register-converter」をリリース致しました。

(5) 精度管理プログラム MCP-QC サポート終了のお知らせ

長らくの間ご利用いただきました精度管理プログラム MCP-QC につきまして、2018 年 10 月をもちまして本プログラムのサポートを終了させていただきます。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

(6) セロロール集計中止項目の訂正について

2017 年 9 月から 12 月分の月次集計のご案内におきまして、セロロールロット 1SE-117/2SE-217 集計中止項目に誤って FER(フェリチン)が記載されておりました。FER(フェリチン)は引き続き集計致します。誤った記載がございましたこと、お詫び申し上げます。集計中止項目は以下の通りでございますので、お間違いないよう、お願い申し上げます。

(7) セロロール仕様変更に伴う一部集計中止お知らせ

セロロールのロット 1SE-117/2SE-217 から AFP、CEA、PSA、CA19-9、CA125、インスリンの集計を中止しており

ます(URL: <https://sysmex-support.com/jp/menu/lot.html>)。万が一ロット 1SE-117/2SE-217 に上記項目のデータ登録をされますと、“RG-CUT エラー”が表示されますので、ご注意ください。HISCL をご使用の場合は、イムノマルチコントロールへの切替えをお願い申し上げます。なお 1SE-116、2SE-216 は、集計終了月(2018 年 8 月)まで上記項目を集計いたします。集計期間はサポートインフォメーションサイトのロット集計期間をご確認ください。

(8) データファイ試験のロットにより APTT 時間短縮が SNCS/eQAPI 外部精度管理結果に及ぼす影響

表題の試験につきまして、SNCS/eQAPI 外部精度管理結果で 3SD、5SD オーバーが出る可能性が確認されております。詳細はこちら(URL: https://sysmex-support.com/jp/news/facilities_10379.html) でご確認をお願い申し上げます。

(9) グループ集計を管理されるお客様へ

SNCS/eQAPI の外部精度管理結果をグループ集計で結果を元にして、各施設や各装置の是正を進められる管理者が、更に効率的に、分かりやすく管理ができるよう、グループマネジメントレポートのリリースを行いました。このレポートをご要望のお客様は、別途申請手続きを必要としますので、最寄りの支店・営業所にご連絡をお願い致します。

(10) UIBC 集計方法追加のお知らせ

UIBC の集計はこれまで方法コード「01」残余鉄比色法と「99」その他の方法の 2 つのみでしたが、お客様のご要望にお応えし、FE(血清鉄)の測定方法と同様に方法を以下の新たに追加しました。

＜UIBC の追加される方法コード＞: 「21」直接比色法(バソフェナンスロリン)、「23」直接比色法(フェロジン)

「24」直接比色法(フェレン)、「25」直接比色法(ニトロソPSAP)、「81」ドライケミストリー法(ビトロス)

詳細は、サポートインフォメーションサイト登録コード集 生化学(Chem/IS) P.16 をご確認ください。

(11) 未利用グループ集計終了のお知らせ

グループ集計の利用状況をお調べした結果、グループ管理者がご利用されていないグループにつきましては、6 月分のデータをもちまして集計を終了させていただくことになりました。ご了承の程お願い致します。

(12) 集計項目追加のお知らせ

全自動免疫測定装置 HISCL 専用試薬の販売に伴い、2 月度データより HISCL PG I /PG II Control の集計を開始しております。装置へのコントロールロットの登録につきましては、下記の通りお願い申し上げます。

項目	コントロール名	箱ロット(例)	レベル 1	レベル 2	レベル 3
PG I	HISCL PG I Control	KA1651	PG1-651L	PG1-651H	
PG II	HISCL PG II Control	KA1651	PG2-651L	PG2-651H	
HCVGr1/ HCVGr2	HISCL HCV Gr コントロール	QNCG-004	QNCG-104	QNCG-204	QNCG-304

(13) ISO/IEC 17043 認定外部精度管理プログラム SNCS/eQAPI 参加証のお申込みについて

年度単位(4 月から翌年 3 月)で全ての参加施設へ発行いたします。(基本的にお申込みは不要です。)それ以外の期間で必要な場合は、お近くの支店・営業所へご連絡ください。なお、お申し込みは 10 日前までお願いいたします。

(14) イムノアッセイコントロール(TSH、FT3、FT4)の販売中止のお知らせ

2017 年 9 月をもちましてイムノアッセイコントロールの販売が中止となりました。HISCL をご使用の場合は、イムノマルチコントロールへの切替えをお願い申し上げます。なお 1LIA17031 2LIA17032 3LIA17033 のロットにつきましては、期間中は集計いたします。集計期間はサポートインフォメーションサイトのロット集計期間をご確認ください。

(URL: <https://sysmex-support.com/jp/menu/lot.html>)

(15) グループ利用規約改訂のお知らせ

グループ集計に関する利用規約を改定しました。詳細は、弊社サポートインフォメーションサイトに掲載致しま

すので、ログインしてご確認をお願いします。

(16)Na、K、CL 方法コード修正のお願い

日本電子、日立、東芝、ベックマンコールター、ロシュなどの多項目臨床化学分析装置においてNa、K、CLをイオン選択電極法で測定されているご施設におきまして、方法コードとして「21:非希釈」を間違って選択されている場合がしばしばみられます。これらの装置では検体を希釈してから測定しますので「22:希釈」が正しい方法となります。「21:非希釈」の場合は母集団のn数も小さく誤った精度管理評価となりますので修正をお願いします。

(17)SNCS/eQAPi 施設部署 ID への個人 ID 登録機能追加のお知らせ

お客様で個人 ID を施設部署コードにご登録いただくことにより、SNCS/eQAPi 画面を個人 ID で閲覧することが可能 となっております。また施設 ID に対しメールアドレスを登録いただくパスワードを忘れた場合の再発行がお客様自身で可能となります。詳細は、お知らせの“**サポートインフォメーションの新機能リリースのお知らせ**”をご確認下さい。

(18)機器コード追加のお知らせ

東ソー株式会社のグリコヘモグロビン分析計 HLC-723G11 の 機器コード GBB910 を追加しました。

(19)HDL-C(協和メデックス)試薬:集計対象外のお知らせ

下記、協和メデックスの方法「52」「58」「59」は、すでに販売が終了しており、現在は「62」の直接法(ML)に統一されております。方法コード「52」「58」「59」にご登録の方は、分類「8」、方法コード「62」へ変更をお願いします。

項目名	項目コード	分類	方法コード	方法
HDL-C	3F070	1	52	直接法 KY (液状試薬)
HDL-C	3F070	8	58	直接法 KY (K 処方)
HDL-C	3F070	8	59	直接法 KY (K)

(21)COAG コード表の改定(レボヘム ATの追加)

レボヘムAT試薬の発売に伴い、AT3 の方法コードを追加しました。

コード番号	測定方法、試薬名	略号
08	レボヘム AT	Revohem AT

(22)HISCL コード表の改定(HCG の追加)

項目コード 4F080 の HCG を追加しました。

項目名	項目コード	分類	方法	機器	校正	温度	試薬ロット	単位	単位名
HCG	4F080	0	01	FDB501	57	08	999	55	mIU/mL