

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

1 月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2021 年 3 月 1 日 (月曜日)

CD-ROM : 2021 年 3 月 1 日 (月曜日)

2. データ受けに関するご案内

(1) 2 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 3 月 5 日 (金曜日) 必着

インターネットの場合 : 3 月 11 日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締切日/ロット集計期間」をご覧ください。この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) 甲状腺刺激ホルモン(TSH)の国際臨床化学連合(IFCC)標準化に向けた集計の分類追加のお知らせ

首題につきまして、TSH(5F901)の IFCC 対応した値の集計として分類“1”を追加いたしました。IFCC 対応の集計用にデータ登録されるときは、分類“1”、単位コード“81”の mIU/L を選択してください。

(2) QAP トロール新ロット QL-022 集計開始時におけるロット登録誤りの対策について

1 月度データから開始した新ロット「QL-022」の集計ですが、既存ロット「QL-021」を測定しているご施設の誤った「QL-022」の選択が続きました。この予防策としてロット登録画面の新ロット QL-022 の表示を“***New_lot1QL-122”および“***New_lot2QL-222”と表示致しました。なお新ロット開始時は集計値に影響を及ぼすため、明らかにロット選択の誤りと判断した場合は削除することがございますので、あらかじめご了承の程お願いします。

(3) SNCS 集計開始項目のご案内(HISCL IFN-λ3、HISCL SARS-CoV2 Ag)

上記の試薬販売に伴い、SNCS 集計を開始しております。

試薬名	コントロール名	項目コード	コントロールロット	開始月
HISCL SARS-CoV2 Ag	CoV2Ag	5FX01	1QNSC-1**/2QNSC-2**	2020/11
HISCL IFN-λ3	HISCL IFN-L3	5JX01	1QNFL-1**/2QNFL-2**	2021/1

本項目はまだ ISO/IEC 17043 対象の外部精度管理ではありませんので、ご注意ください。

(4) “SNCS/eQAPi サービス精度管理データ日次集計の日締め処理日変更のご案内”のお知らせ

日々登録される精度管理データの判定処理の日締め処理が翌日 21:00 から翌々日 12:00 に変更になりました。詳細はこちらをご確認ください。

https://sysmex-support.com/jp/news/facilities_18736.html

(5) エイテストコントロールロット表記の変更について

コントロール製造ロット番号:811MCR 以前は、『1EQCSーロット番号』でしたが、コントロール製造ロット番号:812MJR より、『1EQCーロット番号』となります。

(例):「コントロールロット 812MJR」の場合、レベル 1⇒「1EQCー812MJR」、レベル 2⇒「2EQCー812MJR」

(6) QAPトロール シノテスト社の HDL-C、LDL-C の集計開始のご案内

シノテスト社製の HDL-C 試薬と LDL-C 試薬の集計を 2020 年 6 月度データ分から開始いたしました。コードは以下になりますのでご注意ください。

HDL-C(項目コード:3F070、分類:7、方法:66)、LDL-C(項目コード:3F077、分類:7、方法:66)

(7) QC-Register バージョンアップのご案内

血液装置専用メニューを追加し、シスメックスの血液装置(XE シリーズ、XT シリーズ、XS シリーズ)から出力されるコントロール血球のQCファイル(日内データ)を読み込み、SNCS/eQAPi システムにデータを送信することができるようになりました。血液装置専用メニューから送信したデータを基に QC-Report の Xbar-Rs-R 管理図を作成することもできます。

(8) ALP および LD の IFCC 対応に関するお知らせ

ALP および LD につきまして、IFCC 勧告法の試薬の集計を開始しております。いずれも分類コード「8」、方法コード「12」となりますので、データ登録時にはご注意ください。

(9) 月次レポートの ILAC ロゴの追加のご案内

2019 年 12 月度データの集計分より、月次レポートの表紙に ILAC(国際試験所認定協力機構)のロゴが追加されております。※レポートの内容に修正・変更はございません。

(10) QC-Report バージョンアップのご案内

1つの管理図(Xbar-Rs-R 管理図)に、同一ロットの場合は最大 4 装置分、同一装置の場合は最大 2 ロット分のデータを同時にプロットできます。

(11) コアグピア PT-Liquid 試薬の方法コード「37」の追加

COAG の項目 PT(項目コード 2B030)の方法にコアグピア PT-Liquid(方法コード 37)を追加しました。集計対象のコントロールは「コアグトロール 1X2X」、装置は「コアグプレスタ 2000/3000」となりますので、ご注意ください。

(12) CD-ROM 発送予定日について

2021 年 2 月号 CD-ROM の発送は、2021 年 3 月 26 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。