

# Caresphere™ AM/LM-XQCの アカウント連携方法

シスメックス株式会社

# Caresphere™ XQCへのアクセス

- Caresphere™ AMからCaresphere™ XQCにアクセスします。

## <アクセス箇所>

- 装置コンディション

モデル	内部精度管理	Caresphere™ XQC	装置システム監視	サービス履歴	装置稼働率	校正記録
XR-10 #1 S/N: XR001 N/N: XR-10 #1	BASO% ▲ 1	OK	OK	2021/04/13	>80%	2021/04/13
XR-10 #2 S/N: XR002 N/N: XR-10 #2	OK	OK	エラー	2021/04/13	>80%	2021/04/13
XR-20 #1 S/N: XR003 N/N:	-	OK	OK	2021/04/13	>80%	-
XR-20 #2 S/N: XR004 N/N: XR-20 #2	-	OK	エラー	2021/04/13	>80%	-

- 外部リンク

外部リンク




サポートインフォメーション



Caresphere™ XQC

製品に関する重要なお知らせ

- Caresphere™ XQCのログインID、パスワードを入力し、ログインを押します。



sysmex

Caresphere™ XQC

Login ID \*  
XXXXX

Password \*  
\*\*\*\*\*

→ Login

Copyright© Sysmex Corporation  
[Imprint Information](#) [Privacy Statement](#)  
Caresphere™ XQC Version 1.4.0r20210831

# Caresphere™ XQCパスワードの変更（初回のみ）

- Caresphere™ XQCへのログインが初めての場合は、初期パスワードの変更をお願いします。

（手順）

1. Caresphere™ XQCサイドメニューから『施設情報』を選択
2. 『アカウントタブ』からご自身のログインIDを選択
3. 『アカウント設定』で現在のパスワード（初期パスワード）と新パスワード（変更後のパスワード）を入力し、保存



# 参考情報：ログインID、初期パスワードの確認方法

- Caresphere™ XQCのログインID、初期パスワードは以下の手順で確認できます。

(手順)

1. Caresphere™ XQCサイドメニューから『施設情報』を選択
2. 『アカウントタブ』からご自身のログインIDにチェックを入れ、ダウンロードボタンを押す
3. ダウンロードされたPDFの『アカウント情報』を確認  
(変更済みのパスワードは表示されません)



The image illustrates the three-step process for downloading account information. Step 1 shows the main menu with '施設情報' (Facility Information) highlighted. Step 2 shows the 'アカウント' (Account) tab with a list of accounts where 'TEST9991' is selected and the 'ダウンロード' (Download) button is pressed. Step 3 shows the resulting PDF document titled 'Caresphere™ XQC アカウント証' (Caresphere™ XQC Account Certificate) with the following details:

アカウント情報	
ログインID	TEST9991
初期パスワード	
ニックネーム	
WebサイトURL	https://snccs-web.com/quality/

施設情報	
施設コード	21
施設名	Sysmex Corporation

\*初期パスワードを確認後、速やかにパスワードを変更してください。  
【施設情報】画面 - 【アカウント】タブ

Lighting the way **with diagnostics**