

Platelet CHECK™ 表示値表

Platelet CHECK Level 1 Lot No. 51330597

Platelet CHECK Level 2 Lot No. 51330598

Exp. date 2025年8月5日

XNシリーズ用

Level		PLT 10 ⁴ /μL
Platelet CHECK Level 1	TARGET	152.3
	LIMIT	12.2
Platelet CHECK Level 2	TARGET	269.8
	LIMIT	21.6

Platelet CHECK™

【概要】

Platelet CHECKはXNシリーズ Blood Bank モードの血小板高濃度領域における精度管理用に開発されたコントロール血液です。Level 1とLevel 2の2種類があります。


【使用目的】

Platelet CHECKはXNシリーズ Blood Bank モードの精度管理に使用するコントロール血液です。装置の校正には使用しないでください。

【用法・用量（操作方法）】


1. 未開封のバイアルを使用する場合

- (1) 冷暗所より取り出して室温 (15-30 °C) に戻してください。(約15分間)
- (2) バイアルを両手に挟み、両手で転がすようにかくはんしてください。(約15秒間)
- (3) バイアルの両端を親指と残りの指で挟み、完全に天地が逆さになるように手首を返し
ながら20回素早くかくはんしてください。
- (4) バイアルをボルテックスミキサーで約30秒間かくはんした後、測定します。
ボルテックスミキサーを使用できない場合は、(3)のかくはんをさらに60回程度
繰り返した後、測定します。特に、長時間静置してあるバイアルについては、底に固まりがなく十分にかくはんされている事を確認の上、測定してください。
- (5) 同じバイアルを連続して測定する場合は、測定前に、底に固まりがなく十分にかくはんされている事を確認の上、測定してください。
- (6) XNシリーズでの精度管理は、XNシリーズ Blood Bank モードの取扱説明書に従って行ってください。

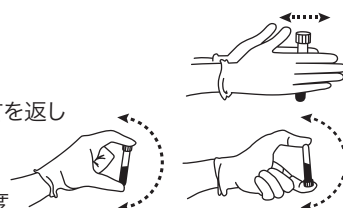

2. 開封後のバイアルを使用する場合

- (1) 冷暗所より取り出して室温 (15-30 °C) に戻してください。(約15分間)
- (2) バイアルを両手に挟み、両手で転がすようにかくはんしてください。(約15秒間)
- (3) バイアルの両端を親指と残りの指で挟み、完全に天地が逆さになるように手首を返し
ながら20回素早くかくはんした後、測定します。特に、長時間静置してあるバイアル
については、底に固まりがなく十分にかくはんされている事を確認の上、測定
してください。
- (4) 同じバイアルを連続して測定する場合は、測定前に、底に固まりがなく十分にかくはんされている事を確認の上、測定してください。
- (5) XNシリーズでの精度管理は、XNシリーズ Blood Bank モードの取扱説明書に従って行ってください。

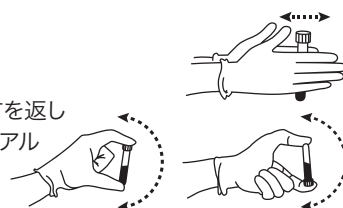

【使用上又は取扱い上の注意】

取扱い上（危険防止）の注意

1. Platelet CHECKの原料となる血液は、HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体、梅毒血清の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染の可能性を完全に否定できる検査法がありません。また、それ以外のウイルスに関する試験はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分に注意をして取扱いをしてください。
2. Platelet CHECKは人体外用の検査試薬ですので、人体には使用しないでください。

使用上の注意

1. 使用時の室温放置時間はできるだけ短くしてください。
長時間室温に放置すると製品の劣化をまねくことがあります。
2. 一度凍結したものは測定結果に影響を及ぼす為、使用できません。
3. 装置の管理は、 $\bar{X}$ m管理など、他の精度管理方法を併用してください。
4. 使用環境温度はXNシリーズの取扱説明書をご確認ください。

廃棄上の注意

1. 試薬及び容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
2. 廃棄にあたっては水質汚濁防止法等の規制及び各都道府県の条例等に留意して処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法: 2～8 °C、凍結禁止

有効期間: 使用期限はバイアルラベル及び外装に記載しています。

開封後の有効期間は7日です。

【包装単位】

製品名	構成	製品コード
Platelet CHECK Level 1	L1 (Level 1) 3.0 mL 16本	PLL-100A
Platelet CHECK Level 2	L2 (Level 2) 3.0 mL 16本	PLN-100A

【問い合わせ先】

シスメックス株式会社 カスタマーサポートセンター

神戸市西区室谷1丁目3番地の2 〒651-2241

Tel 0120-413-034

【記号の説明】



カタログ番号



保存温度



生物学的リスク



使用期限



ロット番号



体外診断用の専用製品



添付の文書参照

製造販売元

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号